


CUIDADO DEL ELECTRODO

QUE HACER Y NO HACER PARA LA LONGEVIDAD DEL PRODUCTO


CON EL CUIDADO APROPIADO, SUS ELECTRODOS FUNCIONARÁN MEJOR Y DURAN MAS.

Por favor tenga en cuenta que cuando los Electrodo s muestren desgaste, deben reemplazarse con un nuevo juego (set) para asegurar que continuará recibiendo un funcionamiento de calidad. Recuerde, los Electrodo s son desechables.


LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES LE AYUDARÁN A OBTENER UN MEJOR USO DE SUS ELECTRODOS.

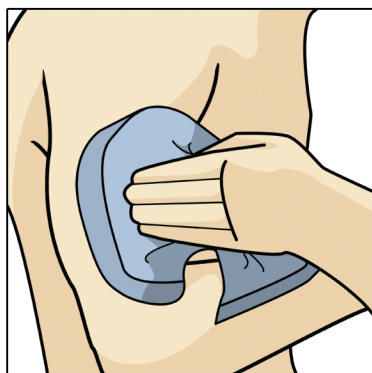


- Asegúrese de que la piel esté limpia, seca y libre de loción o humectantes.

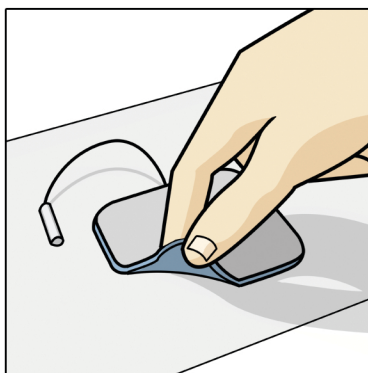


- Para retirar los Electrodo s levante del borde.

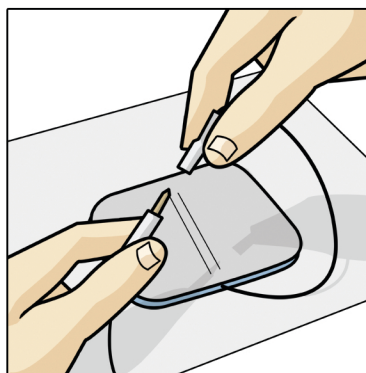


- Para desconectar o insertar la clavija (pin), sostenga el conector.

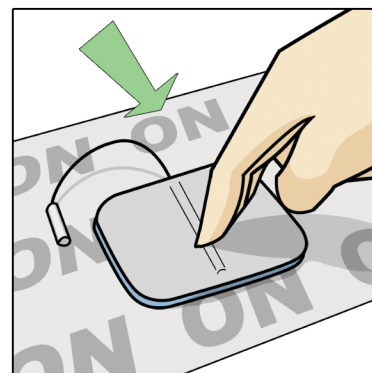


- Coloque los Electrodo s en el plástico del lado "ON".

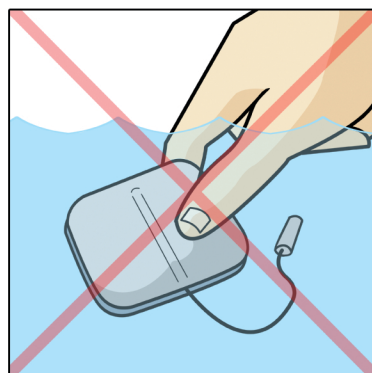


- No sumergir los Electrodo s en agua.

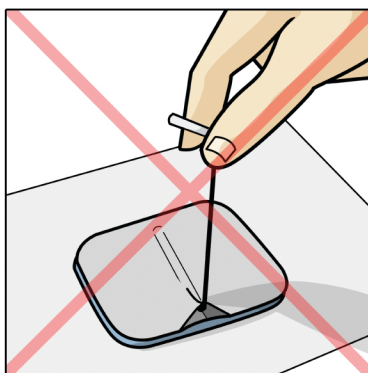

- No hale o tire del cable para retirar los Electrodo s.

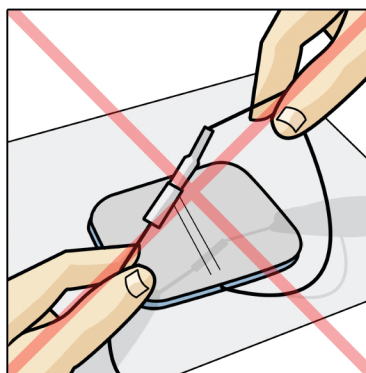

- No hale o tire del cable para separar la clavija (pin).

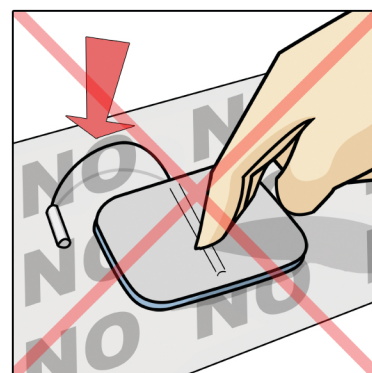

- No coloque los Electrodo s en el plástico del lado "NO".

Sugerencias Adicionales:

- Los Electrodo s están diseñados para usarse solo con un paciente.
- Consulte el manual del estimulador para el tamaño adecuado del Electrodo.
- Si el gel del Electrodo se seca, rehidrátelo con un par de gotas de agua.
- Cuando no estén en uso, siempre coloque los Electrodo s en el envase/paquete original y guárdelos a temperatura ambiente.
- El uso de paquetes calientes y fríos causará que el gel del Electrodo se dañe con el tiempo.
- Para pieles sensibles, considere utilizar nuestros Electrodo s PALS® BLUE.



AXELGAARD
MANUFACTURING CO., LTD.

© 2008 Axelgaard Mfg. Co., Ltd.

HEADQUARTERS: Fallbrook, CA 92028, USA • FAX: +1 (760) 723-2356

EUROPE: DK-8520 Lystrup, Denmark • FAX: +45 8674 2281

WEBSITE: www.axelgaard.com

E-MAIL: support@axelgaard.com